



## Ficha Técnica

### Bolsa Coletora de Urina Estéril BeCare 2.000ml

Dispositivo destinado à coleta e drenagem de urina em sistema fechado.

Anvisa: 80808480062

#### Aplicação:

A Bolsa Coletora de Urina Estéril BeCare é destinada à coleta e drenagem de urina em sistema fechado, utilizada em pacientes clínico e cirúrgico que controle rigoroso da diurese.

#### Benefícios:

- Embalada individualmente
- Esterilizada em óxido de etileno.
- Leve e resistente.

#### Características do Produto:

A Bolsa Coletora de Urina Estéril BeCare é confeccionada em PVC, tem capacidade de 2.000 ml, escala volumétrica gradual. É transparente, possui válvula antirefluxo, tubo de entrada com pinça corta fluxo, ponto de coleta de amostra, via de drenagem contendo interruptor, conector e tampa.

#### Instruções de uso:

1. Verifique se a embalagem primária está íntegra;
2. Abra a embalagem de forma asséptica e retire a bolsa de urina.
3. Verifique se todo o material está íntegro para uso.
4. Feche a válvula do tubo extensor e da via de drenagem.
5. Realize a sondagem vesical conforme protocolo institucional, após, remova a tampa protetora do conector de entrada e conecte-o firmemente no cateter urinário.
6. Posicione a tubulação para assegurar um fluxo sem obstruções para a bolsa de drenagem.
7. Abra a pinça corta fluxo de modo a permitir a passagem do fluxo de urina para dentro da bolsa.
8. Utilizando os ganchos e cordão, pendure a bolsa de urina na cama.

9. Para coleta de amostras, utilize a ponta de coleta com membrana auto cicatrizante.
10. Observe o sistema periodicamente para assegurar que a urina está fluindo livremente.
11. Caso note obstrução ao fluxo de urina devido a posicionamento inadequado ou por obstrução física, reposicione o sistema ou remova a obstrução. Não havendo melhora, oriente – se substituir a bolsa coletora.
12. Quando o volume da urina for maior que o volume estimado do corpo da bolsa, abra o interruptor de saída do reservatório da bolsa e descarte o conteúdo conforme protocolo institucional.
13. Após o uso, descartar o produto conforme protocolo da instituição, respeitando as normativas de biossegurança.

### Composição:

Bolsa e tubo extensor de 100 cm em PVC transparente, Conector escalonado com tampa protetora, Pinça corta fluxo, Ponto de coleta e Válvula de drenagem em PVC e Polietileno, Suporte em polipropileno e Alça em Poliéster.

### Informações Adicionais:

- Manter o produto em ambiente limpo, seco e arejado;
- Proteger da umidade e da luz solar direta;
- Prazo de validade, enquanto na embalagem original é de 3 anos;
- Produto de uso único, individual e por procedimento.
- Descartar conforme regras sanitárias.
- Proibido reprocessar.
- Produto livre de látex;
- Apirogênico;
- Atóxico.