



Ficha Técnica

Invólucro para Esterilização BeCare

Dispositivo destinado à esterilização de produtos médicos

Anvisa: ISENTO DE REGISTRO

Aplicação:

O invólucro para esterilização BeCare é destinado a envolver, proteger e manter a esterilidade de dispositivos médicos esterilizados por VAPOR, ETO, Plasma, Peróxido de hidrogênio, utilizados e manipulados em Centros Cirúrgicos e Centrais de Materiais Esterilizados.

Benefícios:

- Barreira: Alta proteção contra agentes contaminantes e microrganismos infecciosos.
- Resistência: Forte e resistente à tração.
- Conforto: Macio e maleável
- Proteção: Impede a passagem de microrganismos e líquidos.
- Durabilidade: Resistente a rasgos e perfurações.

Características do Produto:

O invólucro para esterilização BeCare é um tecido não tecido - SSMMS que possui cinco camadas, sendo, três de spunbond (externas) e duas de

meltblown (internas), disponível em gramaturas e tamanhos variados.

Essa estrutura oferece alta proteção e barreira contra microrganismos, excelente durabilidade.

As camadas Spunbond proporcionam resistência e durabilidade, já a de Meltblown, são responsáveis pela filtragem e barreira contra microrganismos.

Hidrofóbicos, com hidrofobicidade salina superior a 75 minutos.

Instruções de uso:

1. Realize os procedimentos padrão de higiene e proteção individual antes do atendimento;
2. Verifique a integridade do produto antes do uso;
3. Os itens que serão esterilizados devem estar totalmente limpos;
4. Embrulhe o item que será esterilizado conforme rotina institucional;
5. Proceda a esterilização conforme o método escolhido;
6. Após a esterilização, mantenha o item em local

seco e arejado.

7. Descarte o produto conforme as regras sanitárias vigentes.

Composição:

Tecido não tecido - SSMMS 100% Polipropileno.

Informações Adicionais:

- Manter o produto em ambiente limpo, seco e arejado;
- Proteger da umidade e da luz solar direta;
- Prazo de validade, enquanto na embalagem original é de 5 anos;
- Prazo de validade após processo de esterilização depende do método utilizado e do protocolo institucional;
- Produto livre de látex;
- Uso único;
- Descartar conforme regras sanitárias vigente;
- Apirogênico;
- Atóxico.

Tamanhos disponíveis:

40G - 50 X 50 CM
40G - 100 X 100 CM
50G - 50 X 50 CM
50G - 60 X 60 CM
50G - 75 X 75 CM
60G - 50 X 50 CM
60G - 60 X 60 CM
60G - 75 X 75 CM
60G - 80 X 80 CM
60G - 100 X 100 CM
60G - 120 X 120 CM